

Banda Matriz de Acero Inoxidable

3m x 0,05mm x 7mm



Uso

Instalar la cinta matriz en el portamatriz. Insertar el conjunto de cinta matriz y portamatriz. Ajustar el conjunto al diente. Insertar la cuña anatómica en la proximal y realizar el procedimiento restaurador. Después de terminada la restauración, remover la cuña y el conjunto. Realizar el acabamiento y pulimento.

Principio físico de funcionamiento

La cinta actúa como una barrera física para el material restaurador.

Advertencias, precauciones y restricciones

Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar la contaminación cruzada. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. No utilizar en pacientes que tengan antecedentes de alergia al componente de este producto.

Dimensiones

Largo: 3 metros

Grosor: 0,05mm

Ancho: 7mm

Composición

Acero inoxidable.

Almacenamiento

Almacenar en local seco y al abrigo de la luz solar.