

Silicona

Indurent

Manual de Uso

Catalizador para Polisiloxanos (Siliconas por condensación)

Empleo:

El uso de Indurent Gel se ha previsto en combinación con los siguientes productos de Zhermack: Zetaplus, Zetaplus Soft, Oranwash VL, Oranwash L, Thixoflex M, Orthogum, Zetalabor, Titanium. Para el modo de empleo remitirse a las instrucciones específicas que se encuentran en los correspondientes envases.

Advertencias / Precauciones

- Cerrar bien Indurent Gel después de cada uso.
- Utilizar guantes y vestuario de protección. Evitar el contacto de la piel y los ojos con el catalizador; en caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua corriente y contactar con un médico. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico.
- Procurar no manchar batas ni otras prendas. En caso de contaminación, quitarse la ropa.
- No se recomienda su empleo en mujeres embarazadas.
- Si durante el uso de Indurent Gel se produjeran irritaciones, enrojecimiento y otros signos de hipersensibilidad, interrumpir su uso.

Almacenamiento y Garantía

El material se garantiza durante 36 meses si se conserva correctamente entre 5° y 27°