

NEW

Reciproc® Minima

Precisión para anatomías complejas

La siguiente generación.

Delgada, flexible y ágil: la opción ideal para conductos estrechos y complejos.

Llega donde otros sistemas no pueden.



Basada en la herencia de Reciproc®

- Sin glide path inicial ni negociación previa, diseñada para técnica de una sola lima.¹⁰
- Fácil de aprender.
- Ahorro de tiempo.¹¹
- Tratamiento térmico Blue.



Tratan mas anatomías de conductos con endodoncia de una sola lima

Alcanza la longitud de trabajo sin necesidad de una vía de acceso inicial.

86,7%

Reciproc®
Minima R20



67,5%

Reciproc®
Blue R25

Porcentaje de casos en un estudio ex vivo con 75 molares mandibulares extraídos.¹²

90%

Reciproc®
Minima R20



60%

EdgeOne-
R Utopia™ R20

Porcentaje de casos en un estudio ex vivo realizado en 20 dientes anteriores extraídos con conductos estrechos o parcialmente calcificados.¹³

Desenrollamiento del instrumento

0%

Reciproc®
Minima R20



50%


EdgeOne-
R Utopia™ R20

Porcentaje de casos en un estudio ex vivo realizado en 20 dientes anteriores extraídos con conductos estrechos o parcialmente calcificados.¹³

Convence a los profesionales

En el 95% de los casos,

los clínicos que trataron más de 80 conductos coincidieron en que el uso de Reciproc Minima mejora la capacidad de alcanzar la longitud de trabajo en conductos estrechos y muy curvados (p. ej., MB2).¹⁴

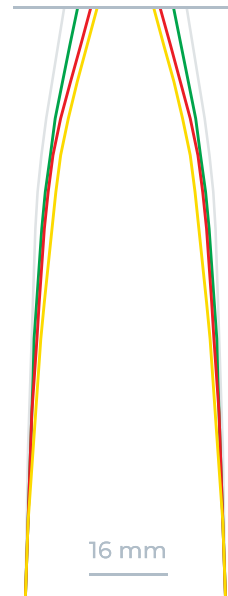

Conicidad promedio a lo largo de la lima:
R20: 3,6 %
R25: 3,3 %
R35: 2,6 %
R45: 2,0 %

Detalles del diseño de la lima:

Punta no activa



Sección transversal en forma de S

Anillos de calibración radiopados para mejor visibilidad

Longitud:	Anillos de calibración en:
21 mm	18, 19, 20 mm
25 mm	18, 19, 20, 22 mm
31 mm	18, 19, 20, 22, 24 mm

Mando corto de 9,5mm

10. G. De-Deus, M. L. Cardoso, F. G. Belladonna, D. M. Cavalcante, M. Simões-Carvalho, E. M. Souza, R. T. Lopes, E. J. N. L. Silva; Performance of Reciproc® Blue R25 Instruments in Shaping the Canal Space without Glidepath; J Endod. 2019 Feb; 45(2): 194-198. 11. Ahorro de tiempo en comparación con sistemas rotatorios tradicionales, basado en menor cantidad de limas utilizadas y menor tiempo clínico en uso con una sola lima. 12. Estudio clínico en curso (CRE 24-04) "The Influence of Operator Experience in the Performance and Fracture Rate of Minima Instruments" Prof. De-Deus (Universidade Federal, Brasil). Datos internos archivados. Para obtener más información, contacte a Consumer-Data-Requests@dentsplysirona.com. 13. Estudio clínico en curso (CRE 25-01) "Negotiation of Narrow and Calcified Root Canals Using Reciproc® Minima, TruNatomy, and EdgeOne-R Utopia" Prof. Martin Vorster, University of Pretoria, South Africa. Limas distribuidas aleatoriamente a Reciproc® Minima R20 o EdgeOne-R Utopia™ R20 (n=10 cada una). Datos internos archivados. Para obtener más información, contacte a Consumer-Data-Requests@dentsplysirona.com. 14. En un estudio in vivo realizado en conductos radiculares de 20 dientes extraídos, el 95,24 % coincidió en que Reciproc® Minima mejora la capacidad de alcanzar la longitud de trabajo en conductos estrechos o altamente curvos (por ejemplo, MB2), en comparación con las limas actuales de la línea Reciproc®. Datos internos